


# ミスターハイ (パワーポンプ) 追加説明書



## 使い方

### 1 機器のセッティング方法

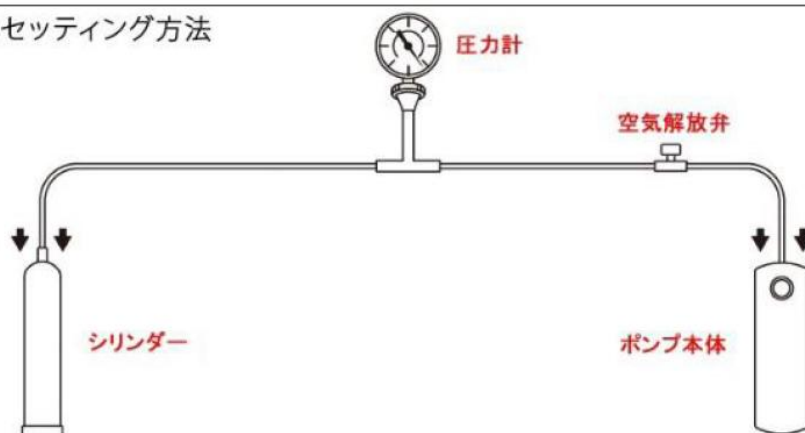

### 2 空気解放弁の使い方



開放弁のツマミを、図をみながら  
右へ回す ⇒ 真空をキープします。  
左へ回す ⇒ 空気を開放します。

### 3 メーターの読み方



メーターの目盛りが、  
0.035前後をキープ → 効果的な陰圧です。

# 概要

商品は、従来のパワーポンプ本体に追加して

- **ホース 1 本** （計ホース 2 本）
- **手動ダイヤル式 空気開放弁**
- **専用ゲージ** （吸引力を目視で確認）

をおつけしています。

モーターの性能については、大幅に向上いたしました。

吸引力については、従来の最大  $0.4 \pm 30$  の吸引力から、 **$0.55 \sim 0.6 \pm 30$  まで** 対応いたしました。

実際に 専用ゲージ（圧力計メモリ）を見ながら、  
更なる吸引力をお客様にて微調整できるキットとなっております。

手動ダイヤル式 空気開放弁も、追加で搭載していますので、  
最大吸引力  $0.6 \pm 30$  までを有効に活用することができるため

- **トレーニングの進捗状況**
- **お客様のペニスの成長具合**

に合わせて、**極限までペニス増大効果を追及できる仕様**となっております。

使い方につきましては、付属の説明書の通りです。

ペニス増大のための適切な圧力は  $0.37 \sim 0.40$  と言われているので、  
ゲージの目盛りを目視で確認しながら、トレーニング初期段階においては

- **$0.37$  になったらスイッチを切る**
- また  **$0.40$  になったらスイッチを切る**

ようにしてください。

全体的な使用方法などについては、商品付属の説明書マニュアルを御覧ください。

# 使用方法

開放弁を閉めてから、吸引してください。

- ① 1 ページ目【1】の画像のように「シリンダー・ホース・本体」を接続します。
- ② シリンダーに、スペーサーを装着します。
- ③ ローションを、シリンダーの底部・内側に塗布します。（陰毛にも塗布します）
- ④ シリンダーを、ペニスにかぶせるように根元まで入れます。
- ⑤ 根元まで入ったら、シリンダーを左右に回して ローションがペニス（陰毛）にも馴染むようにします。
- ⑥ 開放弁が、右へ回っていることを確認してスイッチを入れます。
- ⑦ 上手くできていれば、ゲージは 0.3 をキープします。
- ⑧ キープできていれば、真空状態になっています。  
再度スイッチを入れて、好みの圧力まで上げます。
- ⑨ 初心者の場合は 0.3～0.37くらいを目安に、5 分から 10 分程度を 1 日 1 回行ってください。

## 注意

⑦で 0.3 をキープできない場合は、ローションが馴染んでいないのが原因なのでシリンダーを左右に回して、ローションを馴染ませてください。  
（陰毛が多い方は、短く切ってあげるとキープできるようです）

テスト運転： 初心者の方は、おへそ辺りで練習することをお勧めいたします。

## 中級者・上級者

初心者編のことはできると思いますが、たまに違った刺激が欲しくなる場合があると思います。  
今までのポンプの圧力は 0.40±30 ほどでしたが、今回のポンプの圧力は 0.55～0.6 ほどあります。

普段は0.40ほどの圧力で十分ですが、週に 1 回くらいは、  
0.55まで上げ すぐに開放。これを10セットほどすると、違う刺激を感じます。

愛用者の方々から、このやり方で短期間に増大効果を上げた方が多くいることを聞いており  
【電動式ポンプの吸引力向上 + 手動ダイヤル弁による吸引力調節機能】  
のハイブリッド型 として、生まれ変わりました。

中級者・上級者の方は、ぜひ試してみてください。